

Produktbeskrivelse larvefods trappemaskine



(Side 8 i tysk folder)

2 betjeningsdele (side 11 og 10 i tysk folder)



BETJENINGSDEL BASISENHED

DRIVE - starter kæden i indstillet hastighed.

ON/OF - UP/DOWN - samme funktion som håndtag.

SPEED - hastighed. II er fint.

KEY - nøgle til at tage med, når man går fra maskinen.

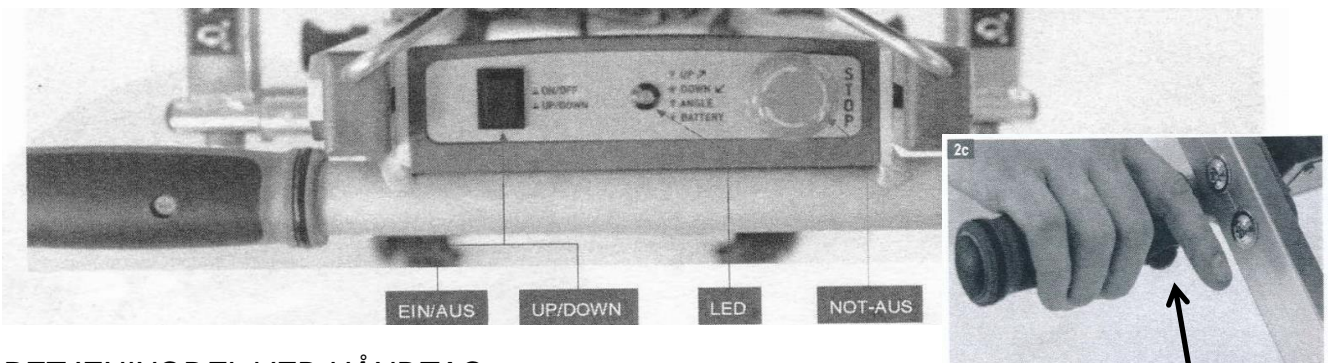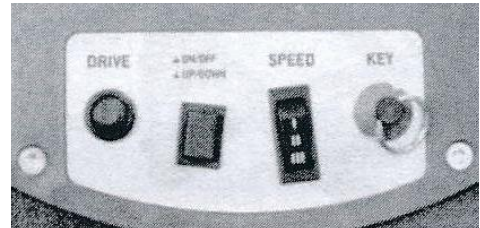

BETJENINGDEL VED HÅNDTAG

EIN/AUS - UP/DOWN - OP/NED (LED KNAP)

- Tænd først på hovedkontakt nederst på betjeningsdel basisenhed (se billedet foroven).
- Tryk så ind på OP/NED knap. Knappen starter altid i opadgående retning, dvs. baglæns. Så lyser LED knap konstant grønt. Hold nu knap under højre håndtag ind, så kører tj. Slip knap igen og tj. stopper.
- Ved et tryk på LED knap skiftes til nedadgående retning - LED knap blinker grønt.
- Ved længere tryk på knappen (mere end 2 sekunder) slukker man. Ved ca. 5 minutters inaktivitet, går maskinen selv over på lavenergi forbrug.

LED KNAP LYSER RØDT

- Trappehældning for stor, mere end 35 graders hældning. 36-40 graders hældning - hastighed nedsættes eller maskinen vil ikke køre.
- Lyser også rødt ved for stor belastning og lyd advarer.


RØD RUND STOP KNAP

- Trykket ind = nødstop tj. kører ikke. Husk tryk ud igen.

NØDREGULERING - HJÆLP (side 24 tysk folder)

Nødregulering

- Nødregulering sidder på venstre side forinden på basisenhed set i kørselsretning.
- Ved manglende strøm batteri eller tekniske problemer på trappe - kan larvefoden bruges manuelt ved at trække i nødreguleringen. Herved bruges den motor anbragte bremse manuelt, hvorved tj. bevæger sig nedad, og alene køres nedad via tyngden fra egenvægt + person + kørestol.

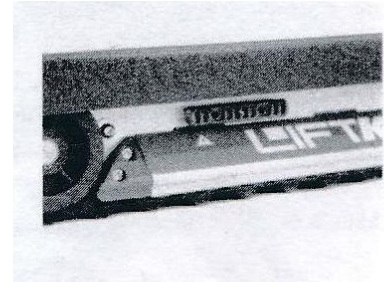


OBS! Før man betjener nødreguleringen

- **NOT AUS** skal være trykket ind i håndtagsenhed samt
- **Nøgle** taget ud i Betjeningsdel basisenhed.
- **Man SKAL være to personer** (chauffør og hjælper), chauffør holder trappemaskinen og hjælper udløser bremsefunktionen via nødregulering.
- Ved træk i nødregulering (hjelper) og tryk i kørselsretning nedad på håndtag (chauffør) sætter larvefoden sig i bevægelse.
- Ved at slippe nødreguleringen igen (hjelper) kan larvefoden til enhver tid stoppes igen.
- Man kører kun til nærmeste nedenunder liggende afsats, og ikke opad.
- Ved mindre samlet vægt (larvefodsmaskine og person) er det evt. nødvendigt at chauffør hjælper med at skubbe nedad.
- Efter brug af nødregulering **SKAL** trappemaskinen til sikkerhedskontrol hos autoriseret SANO Partner.

Brugsvejledning konkret til trappekørsel (side 17-23 tysk folder)


Placer kørestol

- Kør kørestol helt hen til stålstænger.
- Vip låseenheden op til kørestol.

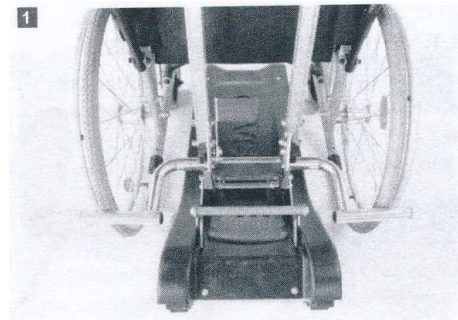


Låse/åbne gribedelen

- Opadgående del på trappemaskinen med håndtag og nakkestøtte på.
- Den åbnes ved tryk på pedal samtidig med træk i metalrør.
- Låses modsat og klikker, når låst.
- OBS. afprøv inden kørsel at den ER låst.

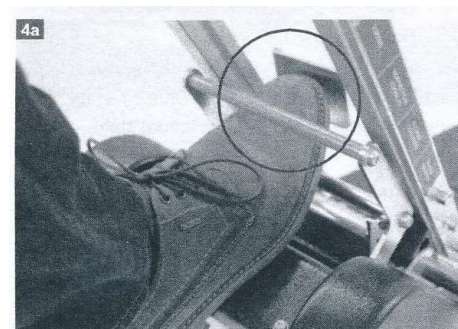


Fixer kørestol

- Opadgående del på trappemaskinen sættes på sider af kørestol og skrues stramt, så kørestol sidder helt fast!
- Indstil nakkestøtten, så den passer til baghovedet på person.
- Husk brems kørestol og sæt bælte på.
- Gå aldrig fra person og tj.

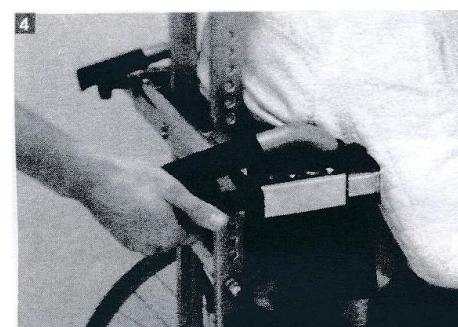

Kør op og ned - stoplinje for vip

- Kør op og ned er beskrevet på side 2.

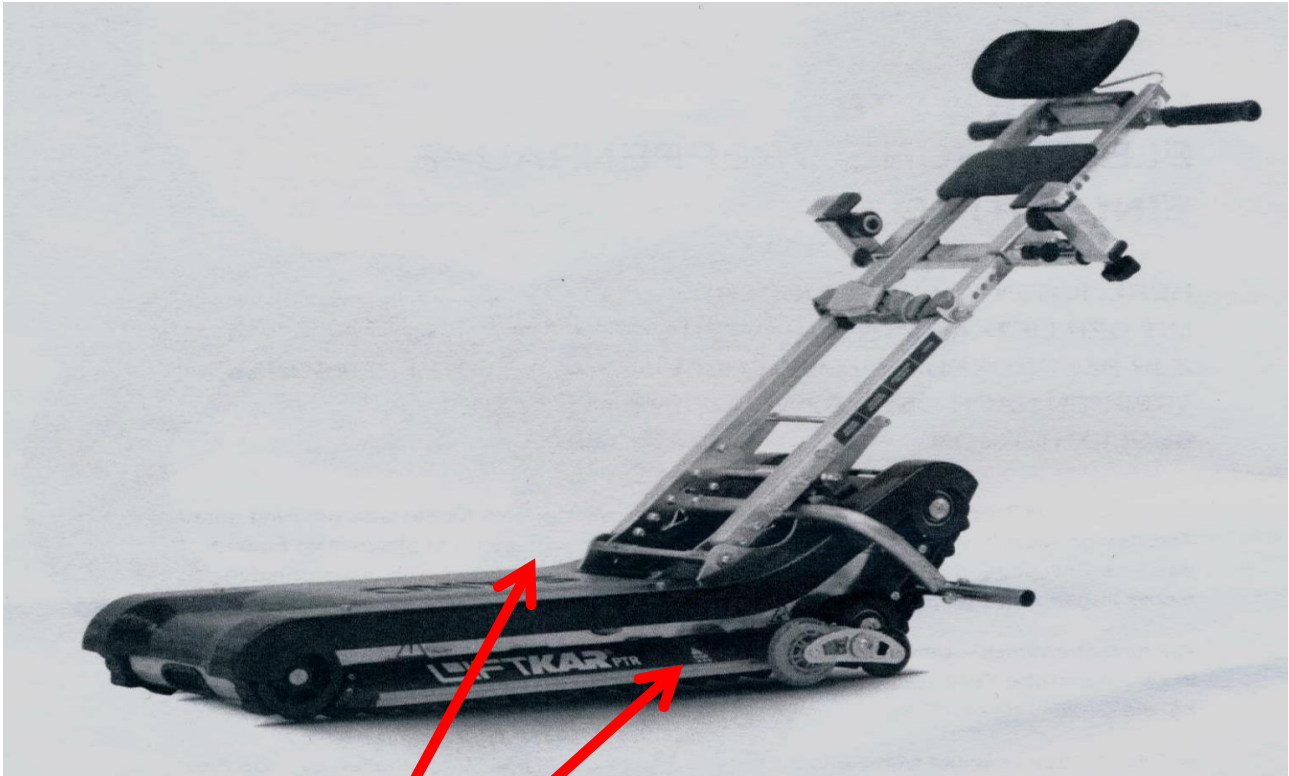

Vigtigt - stoplinje for vip på begge sider af tj.

- Når man starter på afsats og skal ned, må man kun køre ud over trappeafsats til mærke stop på side af trappemaskine forned. SE altid efter, hvor langt du er ude over trappeafsats.
- Kør altid i 90 grader udover afsats.
- Når stopmærke nået, stoppes maskine og man vipper manuelt trappemaskine ned til trin. Så kører man nedad trapper og helt ned på afsats eller plato ved hoveddør.
- Når maskine ned på afsats eller ved plato dør, slukkes maskine, og man tager stol af.
- Dernæst kan man vippe maskine lidt og køre den manuelt ud og ind ad trappeopgange til og fra bil.

Hældnings-vinkel-sensor (side 24 tysk folder)

Liftkar PTR har installeret en trappe hældnings-vinkel-sensor, som automatisk overvåger, at hældningen på trapper aldrig overstiger 35 grader. LED blinker så rødt som beskrevet på side 2 under betjeningsdele.


Man skal også selv huske at måle trapper inden kørsel. Hældnings-vinkel-sensor advarsel er bare en ekstra sikkerhedshjælp.

Batteri-status advarsel (side 24 tysk folder)

Ved lavere energi i batteriet advares man via LED blinker rødt/grønt og en alarm lyder. Man kan herefter køre 3-4 etager på lavt batteri-niveau.

Opladning af batteriet (side 16 tysk folder)

- Sidder nedenunder maskine på side!
- Vend den ikke på hovedet, men kravl ned på gulvet og sæt stik i (brugervenlighed?) Husk at trække det ud igen inden maskine flyttes - ellers ødelægges stikket!
- Det tager 6 timer at oplade fuldt batteri, hvis det er tom fra starten.

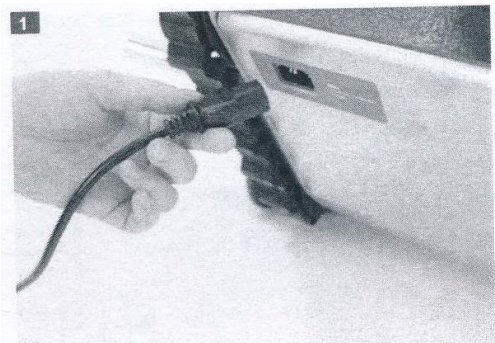

Rengøring/vedligeholdelse (side 25 tysk folder)

- At køre med en ren maskine er sikrest.
- Brug aldrig højtryksapparater.
- Brug kun alkoholbaserede rengøringsmidler eller kun vand og børste til larvefoden.